

CORSET BIVALVE

NOTICE D'INFORMATION

Révisée en Mai 2011



Rhône orthopédie
23 boulevard de l'Europe 69310 PIERRE BENITE
Tel : 04 78 50 34 03 Fax : 04 78 86 07 91
www.rhone-orthopedie.com
E-Mail : www.rhone-orthopedie@club.internet.fr

Mise en place d'un corset bivalve en position couchée.

Dans un premier temps enfiler un T-shirt avec manches, ajusté au patient.

Remarque : s'assurer que le T-shirt ne fasse pas de plis.

Positionner le patient sur le côté

Mettre en place la valve postérieure de façon à ce que le pince taille soit correctement positionné (vérifier que les épines iliaques soient englobées dans la partie postérieure du corset).

Remettre le patient sur le dos et vérifier le centrage de la valve.

Tirer sur le T-shirt pour supprimer les derniers plis.

Placer la valve antérieure par dessus la valve postérieure de façon à refermer le corset.

Serrer les sangles velcros jusqu'aux repères en commençant toujours par celui qui se situe au niveau du pince taille.

Remarque : si le serrage vous semble important, le signaler au médecin, au kinésithérapeute ou à l'orthoprothésiste.

Sauf contre indications, mettre le patient en position assise et vérifier la bonne adaptation du corset au niveau des cuisses et sous les bras. Le corset ne doit pas blesser.

Conseils : changer régulièrement l'interface corset / peau : jersey, T-shirt.