

CORSET SIEGE

NOTICE D'INFORMATION

Révisée en Mai 2011



Rhône orthopédie

46 avenue Jean Jaurès 69600 OULLINS

Tel : 04 78 50 34 03 Fax : 04 78 86 07 91

www.rhone-orthopedie.com

E-mail : www.rhone-orthopedie@club.internet.fr

Vous venez de prendre possession d'un corset siège inscrit dans la Liste des Produits et Prestations Référencés par la Sécurité Sociale. Veuillez lire attentivement et conserver les recommandations suivantes.

1. Mise en place de l'enfant dans le corset siège moulé :

Utilisez des vêtements adaptés (pas trop amples).

Les petits peuvent être installés par une personne seule, pour des patients plus lourds, deux personnes sont nécessaires (à partir de 25 kg nous vous conseillons d'utiliser un lève malade).

Dans un premier temps, bloquez les freins du fauteuil roulant ou du support roulant.

Asseoir l'enfant dans son siège en s'assurant de la bonne position de son bassin. (Il est possible d'incliner le fauteuil roulant vers l'arrière pour que l'enfant soit bien installé au fond de son siège).

NB : il peut rester un petit espace de 1 à 1.5 cm derrière les fesses, ceci est normal. Si le siège dispose d'une ouverture postérieure au niveau du sacrum, on peut ajuster la position de l'enfant en tirant légèrement sur ses vêtements, et vérifier que ceux-ci ne fassent pas de plis.

Une fois l'enfant installé correctement au fond de son siège, fermez la sangle abdominale. Attention, mal serrée ou trop serrée cette sangle peut entraîner des blessures.

Quelque soit le système de fermeture utilisé, suivez les recommandations de serrage de votre orthoprothésiste et de l'équipe médicale.

Fermez ensuite les autres sangles en évitant les plis des vêtements.

Si le siège est muni d'un plot d'abduction, vérifiez que le pubis de l'enfant n'appuie pas fort sur celui-ci.

Placez les accessoires en dernier (tablette, accoudoirs, repose pied...).

Vérifiez la bonne position de l'appui tête.

Surveillez les points sensibles :

Fesses, sacrum, épineuses, appui sous axillaires, zones poplités, pointes des omoplates, zone d'appuis des sangles.

Une rougeur persistante doit attirer votre attention, signalez le problème à l'équipe médicale ou à votre orthoprothésiste qui fera le nécessaire.

2. Sécurité :

a. Liaison au fauteuil roulant :

Assurez vous que les dispositifs de fixation du siège au fauteuil roulant soient en bon état et correctement serrés.

b. Support roulant :

Bloquez les freins du support. Assurez-vous que le dispositif de fixation du siège sur son support, fonctionne correctement. Vérifiez que le système d'inclinaison du support n'entraîne pas la chute du corset siège en arrière : utilisez les allonges anti-bascule. Veillez à ce que d'autres enfants ne puissent pas manipuler le système d'inclinaison ou faire basculer l'ensemble en arrière.

c. Transport :

Avertissement : les corsets sièges ne sont pas agréés par la sécurité routière, ils ne peuvent pas être utilisés comme siège auto.

Cas des fauteuils roulants :

Lorsque le fauteuil roulant est arrimé à l'intérieur du véhicule, les dispositifs de fixation du corset siège au fauteuil roulant ainsi que les sangles de maintien ne suffisent pas en cas de choc. Il faut impérativement utiliser les ceintures de sécurité du véhicule ou un harnais de sécurité immobilisant l'enfant et son corset siège sur le fauteuil roulant.

Un appui tête doit être adapté sur le corset siège ou sur le dossier du fauteuil roulant.

CHABLOZ et RHONE ORTHOPEDIE DECLINENT TOUTE RESPONSABILITE EN CAS D'UTILISATION D'UN CORSET SIEGE LORS DES TRANSPORTS.

3. Entretien, nettoyage et stockage du corset siège moulé :

a. Entretien :

Surveillez l'état des sangles de maintien et de sécurité. Vérifiez, une à deux fois par an, le serrage et l'état des vis de fixation, en particulier au niveau des sangles de portage, du système de réglage de la tête et des éléments de fixation du siège à son socle.

Faites remplacer, par votre orthoprothésiste, les éléments détériorés.

- Nettoyage :

Nettoyez quotidiennement l'intérieur et l'extérieur du corset siège moulé avec des produits d'entretien courant (eau savonneuse, produits désinfectants, alcool ...)

Evitez l'emploi de solvants, type acétone, qui peuvent altérer le collage du revêtement en mousse.

Nettoyez les sangles textiles avec un produit adapté (lessive).

- Stockage :

Lorsque le siège n'est pas utilisé, le placer dans un endroit propre, sec, à l'abri de la chaleur et du soleil.

Attention aux animaux domestiques qui peuvent détériorer le revêtement en mousse et les boucles plastiques.

4. Recommandations particulières :

En cas de température élevée :

Veillez à la bonne hydratation de l'enfant.

Réduisez le temps de port de l'orthèse.

Utilisez une interface isolante entre l'enfant et le corset siège. Ex : une serviette éponge.

Choisissez des vêtements adaptés et veillez à ce que les dispositifs de maintien, plastron, sangles fémorales bretelles, ne blessent pas.

Evitez le transport en véhicule non climatisé.

5. Adaptation et renouvellement :

Lorsque le siège vous semble désadapté. Exemple : serrage excessif, sangles trop courtes, appui tête trop bas, repose pied mal placé, informez l'équipe médicale, votre orthoprothésiste procédera aux réglages et si nécessaire, le médecin décidera du renouvellement du corset siège moulé.